


## 立体構造をしっかりとキープ!

日本製

ぴったり  
密着!ラムダライン  
LINE


ラムダラインは、Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりとキープするマスクの愛称。

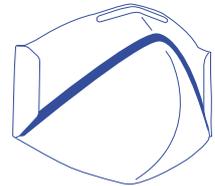

写真はDD02-N95+S

保存期限 製造日から **6年**  
(未開封の状態)動画  
「装着・外し方」リーフレット  
「装着方法」3つの機能で  
もれなく安全


1 アジャスター

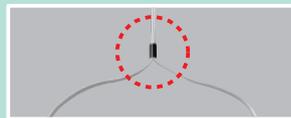しめひもの長さ調節が  
できます。

2 クッション

内側のクッションによって、  
マスクと鼻部のすき間を  
なくすることができます。

3 鼻当て

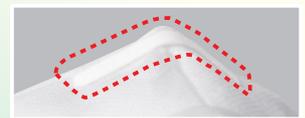外側の鼻当てによって、  
鼻の形に合わせる  
ことができます。

個装タイプ

個装で衛生的



数量: 1箱10個入 小箱寸法: 約 108 × 183 × 95 mm

配布・備蓄用に

小箱なし  
大箱タイプ

※DD02-N95+Sは除く

数量: 1箱100個入 大箱寸法: 約 505 × 249 × 190 mm

袋タイプ

毎日の作業に



保管に便利なチャック付

数量: 1袋10個入 袋寸法: 約 330 × 55 × 220 mm

# サージカルN95マスク



## DD02-N95+S

認証番号 TC-84A-9373


タイプ	入り数[個]	商品コード
個装	10	30270
袋	10	30271

### ■サージカルN95とは

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)規格N95への適合を認証したマスクで、さらにFDA(米国食品医薬品局)が要求する次の基準を満たしています。

- 液体防護性** 耐人工血液浸透性 レベル3適合 (ASTM F 1862)  
人工血液を160mmHgの圧力で噴射した場合の、浸透の有無を確認します。
- 難燃性** 可燃性 クラス1適合 (16 CFR Part 1610)  
試験片に炎を1秒間当て、燃え尽きるまで3.5秒以上であることが求められています。
- 生体適合性** 細胞毒性試験、炎症及び皮膚感受性試験をクリア

# N95マスク

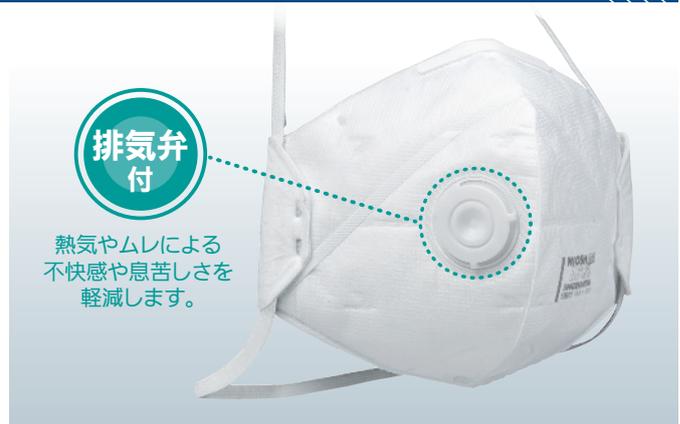

排気弁付

熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。

## DD02-N95-2K

認証番号 TC-84A-7646

タイプ	入り数[個]	商品コード
個装	10	30371
	100	30376
袋	10	30370

## DD02V-N95-2K

認証番号 TC-84A-7645

タイプ	入り数[個]	商品コード
個装	10	30378
	100	30377
袋	10	30375

**排気弁付** はご自身の予防のためにお使いください。(咳エチケットにはなりません。)

### ■シールチェック(ユーザーシールチェック)

密着性の良否を確認する機器(マスク内圧・フィッティングテスター等)を用いる(定量法)か、次の方法(定性法)でご確認ください。



マスク全体を両手で覆い、

**陽圧法** 息を吐きます。  
マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、密着性は良好です。

**陰圧法** すばやく息を吸います。  
マスクと顔の間から空気が流入しなければ、密着性は良好です。(マスクが顔に吸い付く感じです。)

### ■フィットテスト

密着性を確認

MNFT PRO(マスク内圧・フィッティングテスター)は、呼吸用保護具の内側と外側の空気量の個数を測定する装置で、フィットテスト用としてフィットファクタを求めることができます。

リーフレット「MNFT PRO」



被験者

フィットテストの例

実施者



日本の国家検定を受検していませんので、日本国内での労働衛生対策用としては使用しないでください。

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

**STS** 株式会社 **重松製作所**  
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001 横浜 045(314)0921 倉敷 086(450)2221  
仙台 022(235)7733 上越 025(545)4350 広島 082(871)5510  
熊谷 048(529)7566 名古屋 052(682)4798 新居浜 0897(33)8666  
東京 03(3915)8081 大阪 06(6953)8521 福岡 092(431)1265  
千葉 043(301)3004 姫路 079(267)6788